



## INFORMACJE O PRODUKCIE

Nowatorska syntetyczna matryca do zamykania trudno gojących się ran

## PODSUMOWANIE CECH PRODUKTU

- **SUPRA SDRM<sup>®</sup> CW** to nowatorska syntetyczna matryca do zamykania ran, zbudowana jako bimodalna piankowa struktura membranowa do leczenia ran przewlekłych.
- **SUPRA SDRM<sup>®</sup> CW** łączy zalety znanej z Suprathel<sup>®</sup> mikroporowatej struktury, która buduje barierę ochronną umożliwiającą gojenie rany oraz dodatkowych dużych porów, które powstały w celu umożliwienia wrastania naczyń krwionośnych.
- **SUPRA SDRM<sup>®</sup> CW** jest w pełni syntetyczna - nie zawiera składników pochodzenia zwierzęcego - głównym składnikiem zmniejszającym ryzyko biologiczne i reakcje zapalne jest kwas polimlekowy.
- Nie jest konieczne przygotowanie matrycy SUPRA SDRM<sup>®</sup> CW.
- Po aplikacji na ranę **SUPRA SDRM<sup>®</sup> CW** dobrze przylega do łożyska rany bez konieczności bezpośredniego mocowania.
- **SUPRA SDRM<sup>®</sup> CW** po aplikacji staje się półprzezroczysty, umożliwiając personelowi medycznemu łatwą ocenę gojenia rany.
- **SUPRA SDRM<sup>®</sup> CW** jest dostępny w wielu rozmiarach i może być przycinany do indywidualnych potrzeb pacjenta.

## WSKAZANIA


**SUPRA SDRM<sup>®</sup> CW** jest wskazany do stosowania w leczeniu:

- Owrzodzeń żylnych
- Owrzodzeń tętniczych
- Ran cukrzycowych
- Owrzodzeń mieszanych.



## SUPRA SDRM® CW- INSTRUKCJA APLIKACJI

- Nałożyć SUPRA SDRM® CW i przykryć nieprzywierającą gazą; stosować opatrunki zewnętrzne w celu zapewnienia odpowiedniego drenażu, aby utrzymać wilgotne środowisko gojenia rany.
- SUPRA SDRM® CW można nakładać ponownie co 7 dni lub, w razie potrzeby, do czasu zagojenia się rany.
- Opatrunki zewnętrzne można zmieniać, jeśli są zabrudzone.

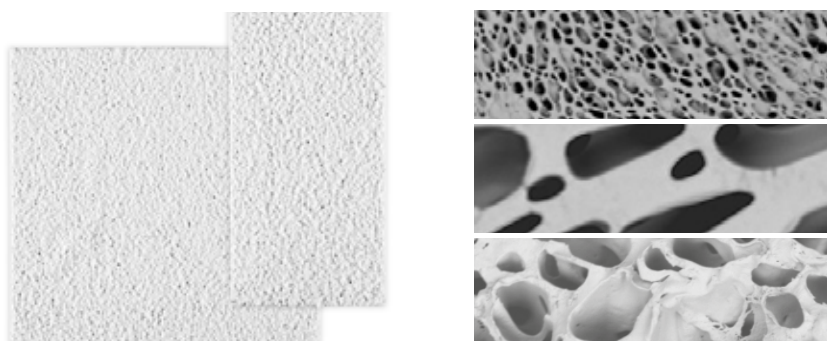

## WŁAŚCIWOŚCI

Skład	Lakto-kapromer, główny składnik: kwas polimlekowy
Degradacja	hydrolityczna (do CO <sub>2</sub> i H <sub>2</sub> O)
Grubość	1,5 - 2,1 mm
Porowatość	> 85%, mikropory 13 - 300 μm
Sterylizacja	Sterylizacja promieniami gamma

## INFORMACJE O OPAKOWANIU

Rozmiar	Jednostki	Nr zamówienia
Dysk Ø 18 mm	1	41D018
1 x 1 cm	1	410101
2 x 2 cm	1	410202
5 x 5 cm	5 x 5 cm	410505
9 x 9 cm	9 x 9 cm	410909
9 x 12 cm	9 x 12 cm	410912
18 x 9 cm	18 x 9 cm	411809
18 x 18 cm	18 x 18 cm	411818

### Przygotowanie łożyska rany



Oczyścić zdewitalizowaną tkankę i w razie potrzeby odświeżyć ranę nakłuciami prostopadłymi. Doprowadzić do hemostazy.

### SUPRA SDRM® CW - Aplikacja



Nałożyć **SUPRA SDRM® CW**, aby zakryć powierzchnię rany.

### Nieprzylegająca warstwa rozdzielająca



Nałożyć nieprzylegający opatrunek, aby utrzymać **SUPRA SDRM® CW** w miejscu. Nakładać opatrunki zewnętrzne, aby uzyskać pożądany drenaż.

### Kontakt:

**PolyMedics Innovations GmbH**  
 Heerweg 15 D  
 73770 Denkendorf  
 Tel. +49 (0)711 719 500-0  
 Fax +49 (0)711 719 500-10  
 E-mail info@polymedics.com

### Dystrybutor:

**Medew Ewa Zaremba**  
 40-749 Katowice,  
 ul. Rudolfa Zuberka 7A  
 tel. +48 606 830 951  
 biuro +48 660 646 060  
 e-mail: biuro@medew.pl

