



INFORMACJE O PRODUKCIE

Nowatorska syntetyczna, biodegradowalna matryca do zamykania trudno gojących się ran

PODSUMOWANIE CECH PRODUKTU

- **SUPRA SDRM®** to nowatorska syntetyczna matryca do zamykania ran, zbudowana jako bimodalna piankowa struktura membranowa do leczenia ran przewlekłych.
- **SUPRA SDRM®** łączy zalety znanej z Suprathel® mikroporowatej struktury, która buduje barierę ochronną umożliwiającą gojenie rany oraz dodatkowych dużych porów, które powstały w celu umożliwienia wrastania naczyń krwionośnych.
- **SUPRA SDRM®** jest w pełni syntetyczna - nie zawiera składników pochodzenia zwierzęcego - głównym składnikiem zmniejszającym ryzyko biologiczne i reakcje zapalne jest kwas polimlekowy.
- Nie jest konieczne przygotowanie matrycy SUPRA SDRM®CW.
- Po aplikacji na ranę **SUPRA SDRM®** dobrze przylega do łożyska rany bez konieczności bezpośredniego mocowania.
- **SUPRA SDRM®** po aplikacji staje się półprzezroczysty, umożliwiając personelowi medycznemu łatwą ocenę gojenia rany.
- **SUPRA SDRM®** jest dostępny w wielu rozmiarach i może być przycinany do indywidualnych potrzeb pacjenta.

WSKAZANIA


SUPRA SDRM® jest wskazany do stosowania w leczeniu:

- Owrzodzeń żylnych
- Owrzodzeń tętniczych
- Ran cukrzycowych
- Owrzodzeń mieszanych.



SUPRA SDRM® - INSTRUKCJA APLIKACJI

- Nałożyć SUPRA SDRM® i przykryć nieprzywierającą gazą; stosować opatrunki zewnętrzne w celu zapewnienia odpowiedniego drenażu, aby utrzymać wilgotne środowisko gojenia rany.
- SUPRA SDRM® można nakładać ponownie w razie potrzeby, do czasu zagojenia się rany.
- Opatrunki zewnętrzne można zmieniać, jeśli są zabrudzone.

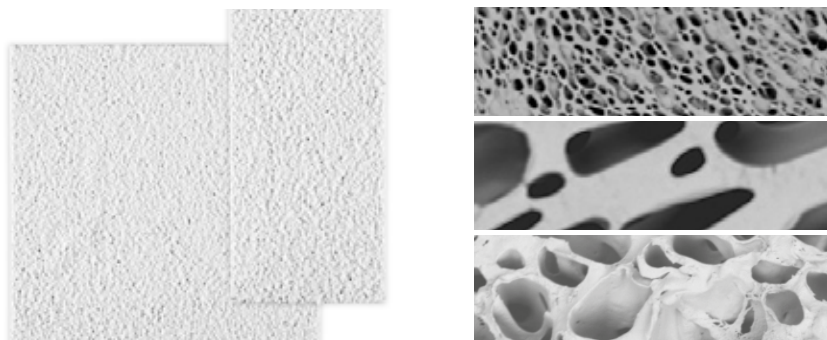

WŁAŚCIWOŚCI

Skład	Lakto-kapromer, główny składnik: kwas polimlekowy
Degradacja	hydrolityczna (do CO ₂ i H ₂ O)
Grubość	1,5 - 2,1 mm
Porowatość	> 85%, mikropory 13 - 300 µm
Sterylizacja	Sterylizacja promieniami gamma

INFORMACJE O OPAKOWANIU

Rozmiar	Jednostki	Nr zamówienia
Dysk Ø 18 mm	1	41D018
1 x 1 cm	1	410101
2 x 2 cm	1	410202
5 x 5 cm	5 x 5 cm	410505
9 x 9 cm	9 x 9 cm	410909
9 x 12 cm	9 x 12 cm	410912
18 x 9 cm	18 x 9 cm	411809
18 x 18 cm	18 x 18 cm	411818

Przygotowanie łożyska rany



Oczyścić zdewitalizowaną tkankę i w razie potrzeby odświeżyć ranę nakłuciami prostopadłymi. Doprowadzić do hemostazy.

SUPRA SDRM® - Aplikacja



Nałożyć SUPRA SDRM®, aby zakryć powierzchnię rany.

Nieprzylegająca warstwa rozdzielająca



Nałożyć nieprzylegający opatrunek, aby utrzymać SUPRA SDRM® w miejscu. Nakładać opatrunki zewnętrzne, aby uzyskać pożądany drenaż.

Kontakt:

PolyMedics Innovations GmbH
Am Hegelesberg 1
73230 Kirchheim
unter Teck Germany
Tel. +49 (0)711 719 500-0
Fax +49 (0)711 719 500-10
E-mail info@polymedics.com

Dystrybutor:

Medew Ewa Zaremba
40-749 Katowice,
ul. Rudolfa Zubera 7A
tel. +48 606 830 951
biuro +48 660 646 060
e-mail: biuro@medew.pl

